

## Caracteristicile materialului

### Compoziție [wt.%]

Ceară sintetică

### Specificații fizice:

Culoare	Gri
Miros	Fără miros
Punct de topire	100-130 °C
Punct de ardere	Nu este cazul
Densitate	0,97 g/cm <sup>3</sup>
Solubilitate în apă	insolubil

### Explicarea simbolurilor



Producător



Consultați instrucțiunile



Codul lotului



Nr. articol



Depozitați în mediu uscat  
soarelui



Evitați acțiunea directă a  
soarelui

## Instrucțiuni de utilizare

### 1. Informații generale

Discurile de ceară **DD camWAX** pot fi frezate cu orice sistem de frezare, cu respectarea recomandărilor în ceea ce privește frezele ce vor fi utilizate pentru prelucrare și frezare. Asigurați-vă că respectați instrucțiunile date de producătorul sistemului de frezare.

### 2. Depozitare

Protejați materialul de razele soarelui. Protejați de umezeală.

### 3. Aria de aplicare

**DD cam WAX** nu este indicat pentru utilizare în cavitatea bucală. Materialul poate fi utilizat pentru fabricarea de machete pentru coroane și punți. Aceste machete se vor folosi ulterior în procesul de turnare, de ex. pentru fabricarea de restaurări dentare. Ceara arde fără urme sau reziduuri.

### 4. Finisarea

Machetele frezate se separă de disc folosind freze extradure din carbid-tungsten cu tăietură încrucișată indicate pentru ceară sau cu discuri corespunzătoare.

#### 4.1 Fixarea canalelor de turnare

Regulile referitoare la atașarea canalelor de turnare depind de aliajul sau ceramica presată utilizate. Puteți găsi informații detaliate despre aliaje, respectiv ceramica presată, în instrucțiunile de utilizare ale producătorilor.

#### 4.2 Ambalarea

Folosiți un liner ceramic în cuveta de ambalare. Mixați masa de ambalat sub vacuum și ambalați în modul obișnuit. Urmați întotdeauna instrucțiunile de utilizare ale masei de ambalare, precum și a aliajului sau ceramicii presabile utilizate.

### 5. Debarasarea

**DD cam WAX** sunt discuri din ceară sintetică. Reziduurile pot fi refolosite pentru modelare convențională. Resturile pot fi de asemenea aruncate în gunoierul menajer. **DD cam WAX** este un material insolubil în apă, inert și nu prezintă niciun risc pentru pâna freatică.